

MOBILTELEFONFORSTERKER SA-40



Takk for at du har valgt vår Mobiltelefonforsterker SA-40. Vennligst les denne manualen før du tar produktet i bruk og oppbevar den for fremtidig referanse. Hvis du har noen spørsmål, vennligst ta kontakt med ditt utleveringssted.

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER:

1. Dette produktet driftes med oppladbare batterier. Ikke bytt til ikke-oppladbare batterier. Lading av ikke-oppladbare batterier kan forårsake batterilekkasje som vil ødelegge produktet (ikke garanti).
2. Ta kontakt med ditt utleveringssted for bytte av batteri.
3. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsenten.
4. Ikke bruk i nærheten av vann.
5. Ikke dra i ledningen for å koble SA-40 fra strømuttaket. Ta tak i pluggen som sitter i strømutaket når SA-40 ikke er i bruk eller for service og/eller rengjøring. Aldri bruk SA-40 hvis pluggen, ledningen eller produktet er skadet. Vennligst send SA-40 for reparasjon til din hjelpemiddelsentral.
6. For bruk av produktet under bilkjøring, vennligst referer til trafikkreglene som må til enhver tid prioriteres fremfor bruk av mobiltelefon.
7. Ikke bruk produktet under storm eller tordenvær. Det kan oppstå elektrisk støt fra lyn.
8. Ikke bruk dette produktet for å rapportere en gasslekkasje i nærheten av lekkasjen.
9. SA-40 er blitt testet og tilfredsstillende alle nødvendige krav ved bruk av originalt tilbehør. Bruk av et annet tilbehør kan medføre at produktet ikke tilfredsstillende kravene.
10. SA-40 batterier kan ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. De må leveres til din nærmeste gjenvinningsstasjon eller samlingspunkt for el-avfall.


INNHold:

Et komplett sett SA-40 inneholder:


- En SA-40 mobiltelefonforsterker
- Ett oppladbart batteri
- En belteklips
- En lader
- Denne bruksanvisningen



SA-40
Mobiltelefonforsterker

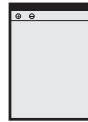


Batteri

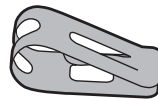

Belteklips

BESKRIVELSE

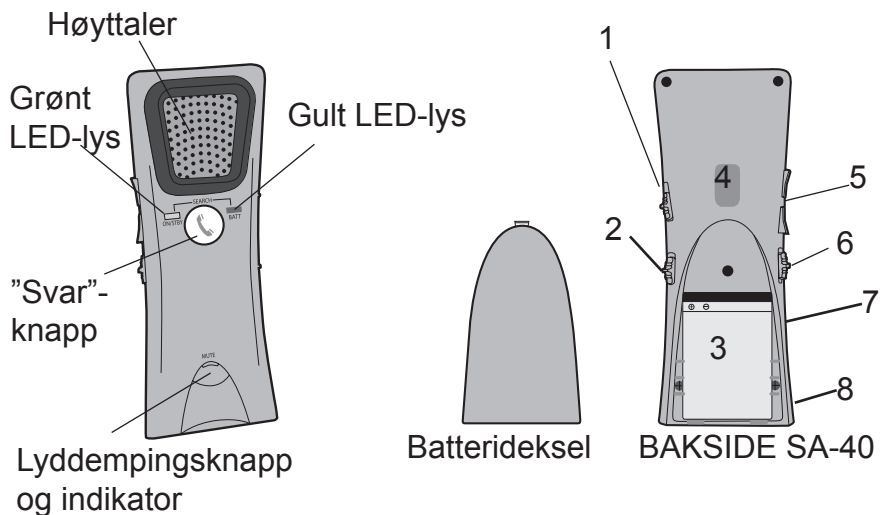

FRONTSIDE SA-40

1. Valgbryter: håndsett-telespole-høytaler
2. Av/På bryter
3. Lithium-ion batteri
4. Feste for belteklips
5. Styrkekontroll
6. Tone: høy-medium-lav
7. Ladeport for mikro USB
8. Utgang for stereo holdetelefoner

FABRIKKINNSTILLINGER:

Fabrikkinstillinger på din SA-40 er:

Valg: Håndsett

Styrke: Medium

Tone: Medium

BATTERI:

Sett batteri som vist på bildet ovenfor. Lad opp enheten før bruk. En full lading tar mellom 3 og 4 timer.

LADING AV SA-40:

1. Når batterinivået på din SA-40 er lavt, vil det grønne LED-lyset blinke kontinuerlig.
2. For å lade din SA-40, koble laderen til ladeporten (7) og til vegguttaket. Det grønne LED-lyset vil lyse hele tiden.
3. Når SA-40 er fulladet vil det grønne LED-lyset slutte å lyse.
4. Aldri ha SA-40 tilkoblet strøm i lenger enn en uke.

KOBLING AV SA-40 TIL DIN MOBILTELEFON:

1. Aktiver Bluetooth tilkobling på din mobiltelefon.
2. Slå på din SA-40. Begge lysene (Grønt LED-lys og Gult LED-lys) vil blinke under tilkobling. Følg anvisningene på din telefon for å fullføre tilkoblingen. Hvis din telefon spør etter PIN-kode, vennligst tast 0000. SA-40 vil være tilkoblet din mobiltelefon inntil du sletter den selv fra mobiltelefonen.

HVORDAN FUNGERER SA-40:

Med valgbryteren (1) kan man velge mellom:

- HS - modus: Håndsett. Du kan bruke din SA-40 som "telefonrør" ved å holde høyttaleren mot øret.
- T-modus: Telespole. Du kan bruke telespolefunksjonen på ditt høreapparat for å høre gjennom høreapparatet.
- SPKR: Høyttaler. Her bruker du høyttaleren på SA-40 for "handsfree" telefonsamtaler.

VIKTIG: SA-40 forsterker lyden fra mobiltelefonen opptil 40dB høyere enn din mobiltelefon. Vær oppmerksom på dette når du stiller inn styrken.

Når du bruker SA-40 som håndsett må den være satt på HS-modus. Aldri bruk SPKR-modus når du bruker SA-40 som håndsett.

Vær oppmerksom på at noen mobiltelefoner lager mer støy enn andre. Dette er også avhenging av signalstyrke og omgivelser.

Ta imot telefonsamtaler med SA-40:

1. Trykk på telefonknappen på din SA-40 når det ringer på mobiltelefonen din.
2. Du kan justere styrken ved å trykke på styrkekontrollknappen (+) eller (-). Du vil høre en pipetonen når styrken har oppnådd maksimum/minimum styrkenivå.
3. For å forbedre tale tydelighet bruk tonekontroll bryteren inn-til du finne tonen hvor du hører best. SA-40 vil lagre denne tonen for fremtidige samtaler.
4. Trykk på telefonknappen på din SA-40 for å avslutte samtalen.

Ringe ut med din SA-40

1. Trykk på telefonknappen på din SA-40.
2. Hvis din mobiltelefon har stemmegjenkjenning, kan du si navn eller nummeret du vil ringe til.
3. Hvis ikke, må du taste nummeret på din telefon.
4. Trykk på telefonknappen på din SA-40 for å avslutte samtalen.

Bruk av SA-40 i bilen:

1. Fest SA-40 til solskjermen.
2. Sett SA-40 til SPKR-modus (høytaler). Vennligst følg trafikkregler som gjelder bruk av mobil under bilkjøring.

Bruk av SA-40 med telespole på ditt høreapparat:

1. Sett SA-40 til T-modus (Telespole). Du vil ikke høre noe lyd direkte fra din SA-40.
2. Sett høytaleren på din SA-40 over ditt høreapparat.

Bruk av dempingsknappen:

Trykk på dempingsknappen for å dempe lyden fra mikrofonen på din SA-40. Dempingsindikatoren vil lyser.

Trykk på dempingsknappen en gang til for å slå på lyden igjen.

FEILSØKING

Samtalepartneren kan ikke høre meg.	Sjekk at dempingsknappen ikke er påslått.
Kan jeg bruke stemmegjenkjenning på SA-40 for å få tilgang til mobilsvareren?	Ja, men kun hvis din telefon støtter denne funksjonen.
Hvor ofte må jeg lade min SA-40?	Avhenging av bruk, kan det være hver dag eller hver uke.
Min SA-40 er påslått og den er koblet til min mobiltelefon, men jeg klarer verken og motta samtaler eller ringe ut.	De kan hende at SA-40 er utenfor rekkevidde som er ca. 10 meter.

RENGJØRING

Bruk kun en myk og tørr klut eller en lett fuktet klut med et skånsomt rengjøringsmiddel for å gjøre enheten rent. Ikke bruk etsende produkter, kjemikalier, alkohol eller andre rengjøringsmidler som inneholder klor, ammoniakk eller andre sterke midler.

GARANTI

2 års garanti fra leveringsdato.

Garantien omfatter fabrikkasjons- og materialfeil. Feil forårsaket av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet omfattes ikke av garantien. Det gjelder også hvis en har forsøkt å skifte batteri selv. Dette utføres kun av utleveringsstedet.

TEKNISKE DATA

Brukstid	Opp til 10 timer avhenging av batteri og mobiltelefon.
Stand-by tid	Opp til 14 dager
Rekkevidde	10 meter
Vekt (inkl. batteri)	85 gram
Mål (uten belteklips)	14 x 5 x 3,3 cm (L x B x H)
Ladeport	Mikro USB
Batteritype	3,7V/800mAh Lithium-Ion
Maksimal ladetid	3 til 4 timer
Ladekrav	5 VCD - 500mA
Bluetooth versjon	v.2.1 + EDR
Bluetooth profiler	HFP - HSP - A2DP
Brukstemperatur	Mellom 0 og 40 grader C
Oppbevaringstemperatur	Mellom -10 og +50 grader C
Forsterkning	Opp til 40 dB

FORHANDLER:
AurisMed AS
Postboks 294
3201 Sandefjord
Tel: 33 42 72 50
e-mail: aurismed@aurismed.no
Web site: www.aurismed.no