

Bruksanvisning

Mino Samtaleforsterker

Art.nr. BE8011-C

HMS nr. 289980



A BELLMAN & SYMFON COMPANY

Aurismed AS

Postboks 294, 3201 Sandefjord, Norge

Tel: +47 33 42 72 50, Faks: +47 33 42 72 51

Epost: info@aurismed.no

Web: www.aurismed.no

Bellman® Audio Mino

Profesjonell Samtaleforsterker, BE2030

Innledning

Takk for at du har valgt et produkt fra Bellman & Symfon/AurisMed AS.

Les gjennom hele bruksanvisningen før du begynner å ta i bruk produktet. Se illustrasjoner av tilbehør og tilkoblingsalternativer.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les gjennom disse anvisningene nøye.
 - Ikke kast disse anvisningene.
 - Ta hensyn til alle advarsler.
 - Følg alle anvisninger.
 - Ikke benytt apparatet der det er fare for at det kan bli vått.
 - Rengjør bare med en tørr klut.
 - Blokkér ikke ventilasjonsåpningene.
 - Installer i henhold til anvisningene.
 - Installer ikke produktet nær varmekilder som ovner, peis eller andre apparater (inklusive forsterkere) som avgir varme.
 - Omgå ikke den sikkerheten som den polariserte eller jordede strømkontakten gir.
-
- Ledningen må ikke tråkkes på eller bli klemt. Pass spesielt godt på ved kontakter og der ledningen kommer ut av apparatet.
 - Benytt bare tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 - Koble fra apparatet og laderen ved tordenvær eller når du ikke skal benytte det over lang tid.
-
- Servicearbeid skal bare utføres av kvalifisert personell. Service er nødvendig hvis apparater har blitt skadet, som for eksempel om ledningen eller kontakten har blitt skadet, væske har blitt sølt på apparatet eller noe har kommet inn i apparatet, om apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer som det skal eller om det har falt i gulvet.

💡 MERK: Bellman Audio Mino Profesjonell Samtaleforsterker, BE2030, er ikke et høreapparat. Bellman & Symfon anbefaler personer som mener at de har nedsatt hørsel å oppsøke lege.

⚠️ ADVARSEL! Bellman Audio Mino Profesjonell Samtaleforsterker, BE2030, har en meget kraftig forsterkning og lydnivået kan være ubehaglig eller i verste fall skade hørselen om produktet anvendes uforsiktig! Senk alltid lyden til et lavt nivå før hodetelefon eller ørepropper tas på!

⚠️ ADVARSEL! Bellman Audio Mino Profesjonell Samtaleforsterker drives av et oppladbart batteri av typen Lithium-Ion. Utsett aldri batteriet for ild eller for direkte sollys. Batteriet skal byttes av Bellman & Symfon eller sertifisert servicepersonell og skal bare erstattes med batteri av samme type. Det er fare for eksplosjon dersom batteriet byttes ut på feil måte. Batteriet må lades helt opp før produktet tas i bruk første gang. Batteriet bør bare lades i temperaturer mellom +5 °C og +40 °C.

⚠️ ADVARSEL! Bellman Audio Mino Profesjonell Samtaleforsterker skal bare lades med Bellman & Symfon anbefalte ladningstilbehør.

⚠️ ADVARSEL! AC/DC laderen må ikke utsettes for vannsprut, og gjenstander som inneholder væske, som for eksempel vaser, må ikke plasseres slik at innholdet kan renne ut på laderen. For å slå laderen helt av må den trekkes ut av stikkontakten.

AC/DC laderen må ikke blokkeres når den står i stikkontakten slik at den enkelt kan nås og frakobles. Viktig informasjon finnes på AC/DC laderens bakside.

⚠️ ADVARSEL! Sikkerhet for barn – Dette produktet kan inneholde smådeler. Pass på at emballasje og smådeler oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠️ ADVARSEL! For å unngå brannfare og fare for elektrisk støt, skal dette produktet aldri utsettes for regn og fukt.



Et symbol viser at dette elektriske utstyret ikke må behandles som husholdningsavfall.

Defekt produkt skal innleveres til utleveringsstedet.

Bildereferanser

1 Intern mikrofon

2 Lysdiode for intern mikrofoninnstilling

Grønt: Rundtoppfattende mikrofon

Orange: Retningsmikrofon

3 Lysdiode for Batteristatus

Grønt: På med fullt ladet batteri

Blinkende Grønt: På, men batteriet er snart tomt

Blinkende Oransje: På med tomt

batteri – apparatet slår seg snart av

Orange: Lader

11 Knapp for å redusere diskant

4 Lysdiode for ekstern lydkilde

Grønt: T(eleslynge)-stilling

Oransje: Ekstern mikrofon

Oransje og Grønt: Line in (stereo)

12 Knapp for å øke diskant

13 Hodetelefontilkobling 3,5 mm jack

5 Knapp for valg av intern mikrofon

14 Tilkobling lader

6 Av- og På-knapp

15 Klemme / Klips


7 Knapp for valg av T(eleslynge)
-stilling

16 Inngang for ekstern lydkilde
2,5 mm jack

8 Lysdiode for Volum og Tone

9 Knapp for å øke lydstyrke

10 Knapp for å redusere lydstyrke

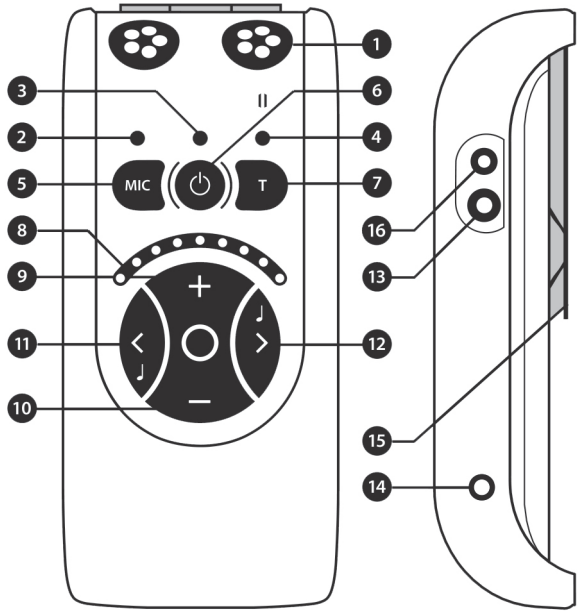

Lading

Mino leveres med et innebygd ladbart batteri. Batteriet må lades før produktet tas i bruk første gang. Mino inneholder et batteri av typen Lithium-Ion og leveres med en universell lader.

⚠ ADVARSEL: Lading av produktet må bare gjøres med medfølgende lader eller tilbehør fra Bellman & Symfon.

Koble inn laderen som vist i manualens utbrett.

Kontroller at den klikker på plass før du kobler den inn i kontakten. Når laderen er satt inn i kontakten og tilkoblet Mino, blinker Lysdioden for Batteristatus (3) fra grønt til oransje for å vise at lading pågår. Når lading er ferdig, etter ca 4 timer lyser lysdioden grønt.

Funksjoner

Koble til Bellman hodetelefon BE9122, Bellman Halssslynge BE9159, Bellman Ørepropper BE9124 eller en annen egnet lyd giver til hodetelefonutgangen (13) på høyre side som vist på bildet på manualens utbrett.

Slå på

Trykk på Av- og På-knappen (6). Lysdioden for batteristatus (3) begynner å lyse grønt for å vise at apparatet er på.

Mino starter alltid med intern mikrofon som lydkilde. Dessuten stilles styrke til lavt nivå for å unngå ubehaglig lydnivå.

Stille inn lydstyrken

Bruk styrkekontrollens +-knapp (9) for å øke og --knapp (10) for å redusere lydnivået. Indikatoren for Styrke og Tone (8) viser lydnivået, jo flere lysdioder som lyser desto høyere styrke. Indikatoren slukkes 5 sekunder etter justering.

Valg av Tone

Bruk tonekontrollens <-knapp (11) for å redusere og >-knapp (12) for å øke diskanten.

Indikatoren for Styrke og Tone (8) viser den valgte innstillingen.

Indikatoren slukkes automatisk 5 sekunder etter justeringen.

Slå Av

Når du ikke skal benytte Mino lenger, slår du av ved å trykke på Av- og På-knappen og holde den inntrykket til Lysdioden for Batteristatus (3) slukkes.

Ta apparatet i bruk

- 1 Koble inn hodetelefon i hodetelefonutgangen (13).
- 2 Trykk kort på Av- og På-knappen (6) for å starte Mino.
- 3 Lytt på den interne mikrofonen og juster styrken med styrkeknappene (+ 9 eller - 10).

Mino starter normalt med intern mikrofon (1) som lydkilde. Dessuten settes alltid styrkekontrollen automatisk til lav styrke for å unngå ubehagelig lydnivå.

Styrkekontroll; justér med +(9) øker og - (10) reduserer styrken samtidig som indikatoren for Styrke og Tone (8) viser lydnivå. Jo flere lysdioder som er tent desto høyere styrke. Indikatoren slukkes 5 sekunder etter justering.

Tonekontrollen justerer lydklngen der > (12) øker og < (11) reduserer diskanten. Indikatoren for Styrke og Tone (8) viser toneinnstillingene. Indikatoren slukkes 5 sekunder etter justering.


Når du er ferdig kan du slå av Mino ved å trykke på Av- og På-knappen (6) og holde den inntrykket til Lysdioden for Batteristatus (3) slukkes.


Slik brukes Bellman Audio Mino

Bellman Audio Mino Profesjonell Samtaleforsterker, BE2030, er en digital samtaleforsterker som er spesielt designet for å gi en fantastisk lydopplevelse, t.o.m. i krevende situasjoner. Bellman Audio Mino fungerer utmerket både for tale og for musikk. Man kan bruke de innebygde mikrofonene eller bruke en ekstern lydkilde. Som ekstern lydkilde kan man velge mellom teleslynge, en ekstern mikrofon eller koble Stereokabelsettet til en lydkilde i stereo. Ekstern mikrofon og stereo kabelsett bestilles separat (ikke inkludert).

Symboler og indikatorer

Følgende symboler benyttes i bruksanvisningen og kan forklares slik:


 Advarselstrekant markerer informasjon som må følges for å garantere riktig funksjon og personsikkerhet.

 Lysepære (tips, merk) markerer informasjon som kan være nyttig for å utnytte produktet best mulig.

Valg av mikrofon


Mino har to mikrofonalternativer. En for rundtoppfangende (omni) og en for retningsmikrofon.

Man kan veksle mellom rundtoppfangende og retningsmikrofon ved å trykke på Mknappen (5). Hvis lysdioden for mikrofon (2) lyser grønt, er den rundtoppfangende mikrofonen aktiv. Hvis den lyser oransje, betyr det at retningsmikrofonen er aktiv.

 Med retningsmikrofonen kan man "peke" mot den lydkilden som du vil lytte til samtidig som lyden fra andre retninger dempes. Dette kan være nyttig i vanskelige lyttesituasjoner, som for eksempel i forsamlinger og steder der det er mye støy.

Telespole / T-stilling

Den innebygde telespolen er vinklet 45 grader for å kunne fange opp induktive signaler fra en teleslynge både når Mino er i horisontal (i hånden eller på et bord) og i vertikal stilling (i klips eller halssnor).

 T-stilling kan brukes i lokaler der teleslynge er installert. Se etter symbolet for teleslynge eller spør personalet om teleslynge finns hvis du er usikker. T-stilling vises ved at lysdioden for ekstern lydkilde lyser grønt.

Velg signalkilde

Det er enkelt å velge signalkilde.

Du kan manuelt velge mellom intern mikrofon (MIC-stilling) eller innebygget telespole (T-stilling) ved å trykke på knappene M (5) og T (7) på fronten. Ved veksling mellom signalkilder vil volumkontrollen automatisk stilles til et lavt nivå for å unngå ubehagelige lydnivåer.

Mino velger automatisk inngang for ekstern lydkilde (16) når noe kobles til. Når du drar ut kontakten går Mino automatisk tilbake til intern mikrofon (M-stilling).

Ekstern lydkilde

Audiokabelen -bestilles separat- (som i den ene enden har en 2,5 mm jack-plugg) kobles til Inngang for ekstern lydkilde (16) vil den interne mikrofonen kobles ut og ekstern lydkilde velges automatisk. Lysdioden for Eksternt lyd (4) lyse grønt og oransje samtidig for å vise at lyden kommer fra en ekstern lydkilde. Om audiokabelen kobles fra vil lyden kobles om til den interne mikrofonen igjen.

Med audiokabelen koblet til en TV, HiFi-anlegg, MP3-spiller eller liknende lydkilde kan man lytte på stereolyd i toppklasse.

Inngangens følsomhet justeres automatisk for å tilpasse til forskjellige lydkilder.

Ekstern mikrofon

Man kan tilkoble en ekstern mikrofon till Inngang for ekstern lydkilde (16). Lysdioden for Ekstern lyd (4) vil lyse oransje for å vise at lyden kommer fra en ekstern mikrofon.

Inngangens følsomhet justeres automatisk tilpasset den eksterne mikrofonen som kobles inn.

Kombinerte signalkilder

Hvis du lytter til en Ekstern lydkilde går det an å kombinere den med lyd som den interne mikrofonen tar opp.

Velg først å lytte på Ekstern lydkilde ved å trykke på T-knappen (7). Hold så Mknappen (5) inntrykket til både MIC- lysdioden (2) og T-lysdioden (4) lyser. Lyden fra den eksterne lydilden blandes nå med lyden fra den interne mikrofonen. Man kan justere balansen mellom den eksterne lyden og den interne mikrofonen ved å holde M-knappen (5) inntrykket samtidig som man stiller inn balansen med knappene < (11) eller > (12).

Om man vil gå tilbake til å lytte til ekstern lydkilde trykker man på T-knappen (7) og om man vil tilbake til bare å lytte på den interne mikrofonen trykker man på M-knappen (5).

Batteristatus

Normalt lyser Lysdioden for Batteristatus (3) . Det viser at Mino er PÅ og at batterinivået er tilfredsstillende.

Ved lavt batterinivå blinker Lysdioden for Batteristatus (3) grønt til batteriet nesten er helt tomt. Da begynner den å blinke oransje. Merk at du bør lade opp Mino allerede når den begynner å blinke grønt, slik at du unngår at den slår seg av automatisk.

Opplading starter automatisk når du kobler inn laderen i Laderinngangen (14). Pågående lading vises ved at lysdioden for Batteristatus (3) lyser fast oransje Lysdioden går over til å lyse grønt når batteriet er fulladet.

Enkel feilsøking

Ingenting skjer når du forsøker å slå på enheten

- Koble inn laderen og kontroller at lading starter i løpet av 10 sekunder.

⚠ OBS! Om lading ikke starter i løpet av 10 sekunder, må du umiddelbart koble fra laderen og ta kontakt med utleveringsstedet!

Ingen lyd høres i hodetelefon / halsslynge når enheten er på.

- Skru opp lyden med volumkontrollen + (9)
- Kontroller at intern mikrofon er valgt som signalkilde og at den fungerer ved å stryke lett på mikrofonene (1).
- Kontroller at kontakten er satt helt inn i hodetelefonutgangen.
- Koble hodetelefonen/halsslyngen till en annen lydkilde (med 3,5 mm jack-kontakt) for å teste om den fungerer.

Ingen lyd høres i hodetelefon / halsslynge når enheten er på og Ekstern lydkilde er valgt.

- Kontroller at lydilden er korrekt tilkoblet Inngangen for ekstern lydkilde (16).
- Koble lydilden direkte til hodetelefon eller halsslynge og se om den fungerer da.
- Skru eventuelt opp styrken på den eksterne lydilden.

Pipetone i hodetelefonen.

- Senk volumet eller øk avstanden mellom mikrofonen og hodetelefonen.
- Rett mikrofonen fra deg.